

ENDOMAX[®]

根管治療手機



Order No.178N



Order No.178

衛署醫器製壹 字第002651號

ENDOMAX[®]

- 輕巧無線把手設計，操作方便，可適用各種廠牌Ni-Ti根管針。
- 自動停止和自動反轉後正轉功能可避免根管針折斷。
- 特殊角度往返功能及反轉模式協助擴大修形。
- 平滑造型，符合人體工學，提供最佳操作舒適度。
- 機頭可變化六種角度，方便各個患部治療。
- 高扭力馬達工作力強，持久耐用。
- 五種扭力級數設定，當扭力到達時，指示燈會隨選取的數值亮起。
- 九段轉速選擇可應用於不同的根管針及療程。
- 大容量鋰電池隨充隨用，無記憶特性提供穩定且長時間的使用。
- 彎機頭可拆卸並可高溫高壓消毒。
- 內建低電量指示燈，提醒醫師隨時充電。

ISO 13485

GMP

CE₂₄₆₀

DENTAMERICA[®]


ENDOMAX[®]

根管治療手機


自動反轉後正轉

1. 順時針轉動
2. 到達設定扭力值時，反轉
3. 當阻力變小，繼續以順時針轉動

178


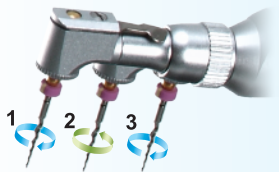


178N

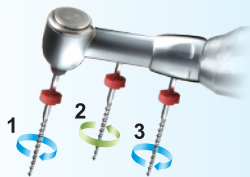


往返模式

1. 根管針正轉(順時鐘)角度30度，反轉(逆時鐘)角度150度轉動
2. 使用特殊根管針時建議設定此模式
3. 在此模式下按“REV”鍵可進行正轉(順時鐘)退針

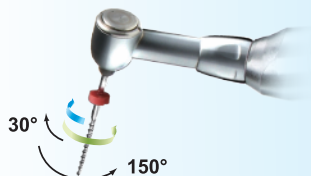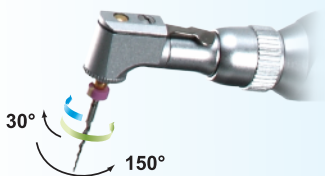

自動反轉後停止

1. 順時針轉動
2. 到達設定扭力值時，反轉
3. 當阻力變小時，停止轉動

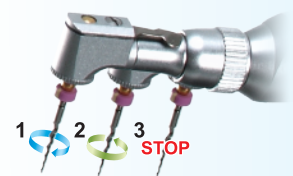

啟動鍵

自動反轉後
正轉模式指示燈

往返模式指示燈

自動反轉後停止

反轉模式指示燈

轉速設定鍵

扭力設定鍵

低電量指示燈

178 產品規格

Input	AC 100V~240V 50-60Hz
Fuse	1A 250V
Battery type	3.6V 2040mAh
Dimensions (handpiece)	L192xW26xH29mm
dimensions (charging station)	L105xW85xH59mm
weight (handpiece)	150g
weight (charging station)	125g

178N 產品規格

Input	AC 100V~240V 50-60Hz
Fuse	1A 250V
Battery type	3.6V 2040mAh
Dimensions (handpiece)	L198xW26xH29mm
dimensions (charging station)	L105xW85xH59mm
weight (handpiece)	150g
weight (charging station)	125g

扭力設定級別	扭力值
5	4.0 N·cm
4	3.0 N·cm
3	1.5 N·cm
2	1.0 N·cm
1	0.5 N·cm

DENTAMERICA[®]

亞洲分公司

登特美有限公司

台北市敦化南路二段128號7樓之1

服務專線：(02)27554445 分機 38

傳 真：(02)27554919

網 址：www.dentamerica.com.tw

經銷商

DENTAMERICA[®]